

Les patchs chauffants longue durée Arthrosteol soulagent naturellement les douleurs musculaires.

La thermothérapie : une source active de chaleur et de confort. Au contact de l'air, les actifs naturels contenus dans les patchs chauffants Arthrosteol produisent de la chaleur. Appliqués directement sur la peau, les patchs chauffants Arthrosteol diffusent une chaleur constante en profondeur, permettant d'apaiser et de soulager naturellement les douleurs musculaires sans agents médicamenteux. La thermothérapie en améliorant la circulation sanguine, favorise l'oxygénation des muscles permettant ainsi une meilleure élimination des toxines responsables des contractures.

Le patch : efficace et facile d'utilisation. Le patch permet d'agir directement sur les zones douloureuses (dos, nuque et épaules). Les patchs chauffants Arthrosteol sont prêts à l'emploi. Ils se positionnent et se retirent facilement, sans douleurs. Discrets, sans odeur et souples, ils soulagent vos douleurs musculaires en toute discrétion.

Dispositif médical destiné à soulager les douleurs musculaires localisées et occasionnelles - Lire attentivement les instructions avant usage.

Conseils d'utilisation : Ouvrir l'emballage extérieur, retirer le film protecteur du patch et appliquer la face adhésive directement sur une peau propre, sèche et saine, au niveau de la zone douloureuse (dos, épaules, nuque) en appuyant fermement. Veiller à ce que le patch adhère bien à la peau sur toute sa surface. Le patch commence à chauffer au bout de quelques minutes et diffuse une chaleur longue durée (jusqu'à 8 heures). Retirer doucement le patch après utilisation. Produit à usage unique.

Recommandations : Usage externe exclusivement. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Si les douleurs persistent au-delà de 5 jours consulter un médecin. Si la sensation de chaleur est trop forte ou anormale, retirer délicatement le patch sans attendre. De légères rougeurs peuvent se manifester en fonction de la sensibilité de chacun. Ne pas appliquer plus de 8h de suite sur la même zone et attendre 24 heures entre chaque utilisation. A conserver à une température inférieure à 25°C. A utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

Contre-indications : Ne pas utiliser dans les cas suivants : Si vous avez déjà eu une réaction allergique à un patch auto-chauffant ou en cas d'allergie à l'un des composants. Sur une zone où la chaleur ne peut pas être ressentie, sur le visage et les muqueuses, sur une peau abîmée (bleus, bosses, plaie, brûlure, irritation, gonflement...) et sur une zone susceptible d'être soumise à de fortes pressions. Chez les enfants de moins de 12 ans ou chez les personnes ne pouvant pas retirer le patch sans une aide extérieure. Sur une atteinte musculaire nécessitant du froid (élongation, claquage, contusion, tendinite...). En complément à d'autres produits à usage local, ou d'autres sources de chaleur.

Mise en garde : Comme toute source de chaleur, ce produit peut causer des brûlures, il est impératif de bien respecter les instructions. N'ouvrir le sachet qu'au moment de l'application. Ne pas utiliser si l'enveloppe est percée ou endommagée (risque de brûlure). Si le patch est déchiré, rincer à l'eau les parties du corps qui ont été mises en contact avec la poudre et consulter un médecin si besoin. Ne pas avaler la poudre. Ne pas mettre au four micro-ondes. Ne pas couper, plier ou mouiller le patch. Ne pas utiliser pendant le sommeil. Éviter de l'utiliser en position allongée et sous une ceinture ou un bandage.



Arthrosteol

Patch chauffant

ACTIONS CIBLÉES Dos / Nuque / Épaules

- Soulage naturellement les douleurs musculaires
- Chaleur thérapeutique
- Sans agents médicamenteux



10 Patchs adhésifs



Précautions d'emploi : Demander conseil à votre médecin avant d'utiliser ce produit dans les cas suivants : Si vous avez plus de 65 ans car votre peau est plus sensible et délicate. Mauvaise circulation sanguine (exemple : insuffisance cardiaque), Grossesse et allaitement. Problèmes nerveux (exemple : perte de sensibilité due au diabète), Polyarthrite rhumatoïde. Affections cutanées comme eczéma, psoriasis ou peau très fragile ou sensible. Immuno-déficience.

Composition : Textile : 100% polypropylène recouvert par un film de polyéthylène. / Contenu du patch : Poudre de fer, eau, charbon activé, polyacrylate de sodium, sel, vermiculite.